



TB-ST⁺² Tuberkulose-Schnelltest mit 2 weiteren Antigenen

Der schnellste
Tuberkulosestest
seiner Zeit!

Der TB-ST ist der zurzeit schnellste In-vitro-Test zum Nachweis von Antikörpern (IgG, IgM und IgA) gegen *Mycobacterium tuberculosis*. Mit seiner Hilfe ist eine klare Aussage über das Vorliegen einer aktiven Tuberkulose möglich. Als Probenmaterial dienen lediglich geringe Mengen Serum oder Vollblut. Das Testergebnis liegt bereits nach 15 Minuten vor.

Der TB-ST vervollständigt das Angebot an Nachweissystemen!

Der Tuberkulintest und der Tuberkulose-Schnelltest ergänzen sich in idealer Weise. Durch den Nachweis spezifischer Antikörper gegen das *Mycobacterium tuberculosis* ermöglicht der TB-ST - im Gegensatz zum Tuberkulintest - die Erkennung einer aktiven Tuberkulose. Somit ermöglicht der TB-ST die in der Diagnostik so wichtige Aussage der Tuberkuloseinfektion. Das Testergebnis wird weder durch eine frühere Impfung noch durch eine inaktive Infektion verfälscht.

DiaVita hat sich auf den Vertrieb innovativer, einfach zu handhabender Tests für die tägliche Routine spezialisiert. Der TB-ST ist das erste Produkt einer kompletten TB-Diagnostiklinie. Weitere Tests für andere Indikationsgebiete werden folgen.

Nachweis nach
bereits 15
Minuten!

- ▶ erhöhte Sensitivität
- ▶ noch bessere Ablesbarkeit

 **DIAVITA**

TB-ST⁺² Tuberkulose-Schnelltest

Anwendungs- darstellung



TB-ST⁺²



Highlights

- ▶ gebrauchsfertig
- ▶ ohne Verwurf einzeln anwendbar
- ▶ einfach in der Durchführung
- ▶ aus Serum oder Vollblut
- ▶ schnell
- ▶ sicher in der Interpretation
- ▶ spezifisch für Tuberkulose

TB-ST entnehmen und mit Patientennamen beschriften.

1 Tropfen Vollblut oder 1 Tropfen Serum in die mit „S“ gekennzeichnete Vertiefung pipettieren (1).


Danach 2 Tropfen Puffer aus der Tropfflasche zu der Probe in der Vertiefung „S“ (2) geben.

Das Ergebnis kann nach 15 (spätestens 25) Minuten abgelesen werden.

Negatives Ergebnis:
Purpurfarbener Streifen in der Zone „C“ (3).

Positives Ergebnis:
Zwei purpurfarbene Streifen in der Zone „C“ und Zone „T“ (4).

Kontrolle: Purpurfarbener Streifen in der Zone „C“ zeigt die erfolgreiche Durchführung des Tests an.

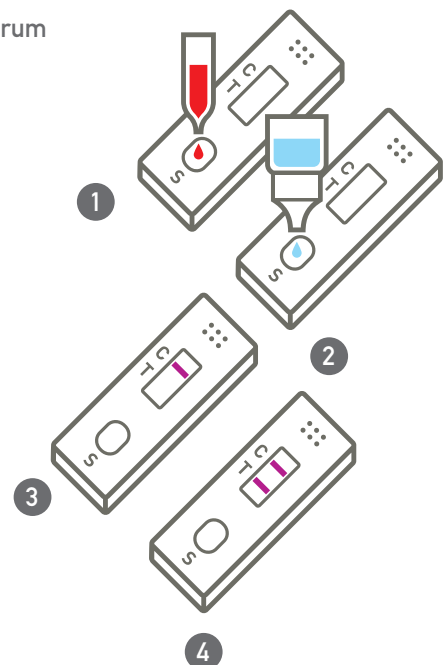

Bestellen Sie hier den neuen TB-ST⁺² zu besonders günstigen **Institutionskonditionen** laut beigefügter GPK-Preisliste!

GPK

Gesellschaft für
medizinische Prävention
und Kommunikation mbH

Vertriebs- und
Marketingbüro:
Karlsruher Str. 88
76139 Karlsruhe

Tel. (0721) 680 28 36
Fax (0721) 680 27 14
Email: kontakt@gpk.de
www.gpk.de