

SICHERHEITS-EINMALKANÜLEN SURGUARD2™



■ Einhand-Bedienbarkeit

Die Aktivierung des Nadelschutzes erfolgt ohne Umgreifen mittels Druck mit Zeigefinger und Daumen.

■ Integrierte Sicherheitsfunktion

Der Überwurfschutz ist fest an der Kanüle montiert.

■ Irreversibler Schutz

Widerhaken fixieren den Nadelschutz irreversibel.

■ Sicherheitskontrolle

Hörbares Einrasten signalisiert Aktivierung des Nadelschutzes. Sichtfenster für visuelle Kontrolle.



Schmaler, stromlinienförmiger Nadelschutz



Ratschenmechanismus ermöglicht Positionierung des Nadelschutzes und erlaubt einen optimalen Injektionswinkel.

Nach oben zeigendes Kanülenauge und rechtsliegender Nadelschutz ermöglichen auch Injektionen in kleinen Winkeln

SICHERHEITS-PERFUSIONSBESTECK SURSHIELD® SURFLO®

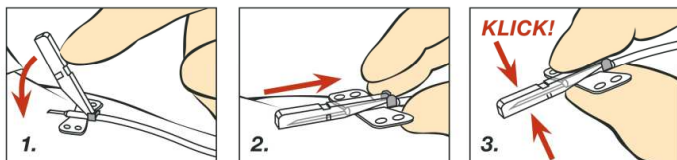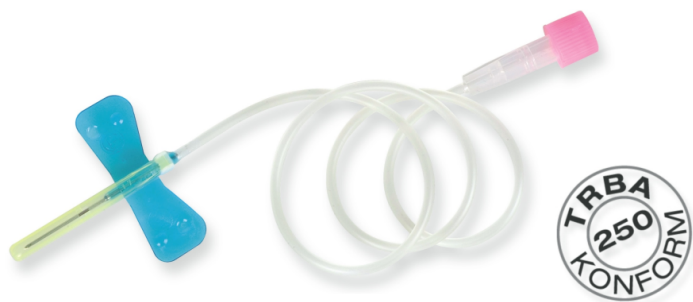

1. Nach Gebrauch den Nadelschutz über die Kanüle legen.
2. Flügelkanüle hinter den Flügeln festhalten und aus der Vene ziehen.
3. Am Flügelansatz die Flügel und den Schutzüberwurf mit Daumen und Zeigefinger zusammendrücken bis die Kanüle hör- und sichtbar einrastet. Dann die Kanüle in die TERUSAFE-Box entsorgen.

■ Einhand-Bedienbarkeit*

Der Nadelschutz wird mittels Druck durch Daumen und Zeigefinger am Flügelansatz aktiviert. Die Finger bleiben hinter der Kanüle.

■ Sicherheitskontrolle

Hörbares Einrasten signalisiert Aktivierung des Nadelschutzes. Sichtfenster für visuelle Kontrolle.

■ Besondere Einstichausführung

Das Sicherheits-Perfusionsbesteck Surshield®-Surflo® von Terumo® vereint das Beste der Terumo-Kanülentechnologie.

■ Anwenderfreundlichkeit

Der Protetor schränkt die Punktionsstechnik nicht ein.

* OSHA bloodborne pathogen standard 1910.1030(D)(vii)(B)

Terumo Deutschland GmbH • Ludwig-Erhard-Str. 6 • 65760 Eschborn
Tel. +49 (0) 61 96 - 80 23 100 • Fax +49 (0) 61 96 - 80 23 200
www.terumo-europe.com

TERUMO®
We keep life flowing